

# Biogel® Tech käsineet

Biogel® Tech käsineet on suunniteltu käytettäväksi kriittisessä ympäristössä. Kaksinkertainen ja kuumasaumattu pakkaus noudattaa hygieniaprotokollaa ja varmistaa yksinkertaisen käytön.

## Kuinka purkaa Biogel Tech käsinepakkaus varmistaen steriilin käyttöönoton

1



Käytä muoviesiliinaa suojaamaan vaatteesi lialta pahvilaatikossa. Tämä lika voi muuten kulkeutua sisällä olevien muovipussien joukkoon laatikkoa avattaessa ja pakkauksesta purettaessa.



Jokainen kuljetuslaatikko sisältää 200 paria käsineitä. Jokaisessa TRP:n neljässä osiossa on 2 x 25 paria käsineitä pakattuna kuumasaumattuihin kaksoismuovipusseihin\*.

2



Ennen kuin purat muovipussit, varmista, että kätesi on desinfioitu. Varo koskettamasta muovipusseja likaisilla käsillä.



Aseta pussit puhtaalle ja desinfioidulle pinnalle.

\*160 paria kokoa 9

3




Ulomman muovipussin poistamiseen suosittelemme saksien käyttöä. Aloita reunoista kontaminaatoriskin minimoimiseksi. Muista sitten taittaa muovi ulospäin koskematta sisäpuoliseen muovipussiin.

4



Desinfröi kätesi ennen kuin asetat 25 paria (vielä muovipussissa) toiselle puhtaalle desinfioidulle pinnalle.

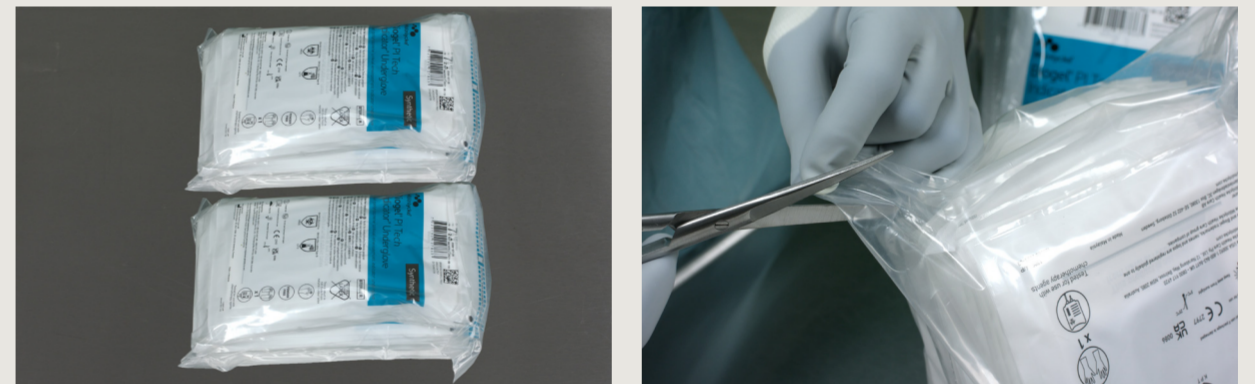

Käsineet voidaan säilyttää sisäisessä muovipussissa tai purkaa ja laittaa säilytyslaatikkoon. Pue asianmukaiset suojavaatteet ja steriilit käsineet ennen kuin purat steriilit suojat sisäisestä muovipussista. Jälleen saksista on hyötyä muovipussin pohjan leikkaamisessa, jotta säilytyslaatikko on helppo täyttää.



Käsineet voidaan nyt säilyttää lähempänä käyttöpaikkaa.

### Biogel Tech valikoima – Aava seuraavan tason turvallisuus

Jokainen Biogel Tech -käsinepari on kääritty korkealaatuiseen polyeteenistä valmistettuun sisäkääreeseen hiukkasten määrän pitämiseksi minimissä. Kääre on rakennettu niin, että se pysyy auki taitettuna, mikä varmistaa käsineiden aseptisen pukemisen. Sitten pari pakataan steriiliin suojakalvoon, joka on valmistettu laminaattipolyesteristä ja matalatiheyksistä polyeteenistä.

Lue lisää [www.molnlycke.fi](http://www.molnlycke.fi)

Mölnlycke Health Care AB, P.O. Box 13080, Gamlestadsvägen 3 C, SE-402 52 Göteborg, Sweden. Phone + 46 31 722 30 00  
The Mölnlycke and Biogel trademarks, names and logos are registered globally to one or more of the Mölnlycke Health Care group of companies. Hands Deserve Better is a trademark of Mölnlycke Health Care AB. ©2023 Mölnlycke Health Care AB. All rights reserved. HQIM004742



# Biogel® Tech

Kätesi Ansaitsevat Parempaa™

  
**Mölnlycke®**